

Betriebsanleitung für die Dermalux Multimedia-Cam 2008

Betrieb der Dermalux Checkbox mit der Dermalux Multimedia Cam 2008

Das Farbkamera-Modul (1) an die Dermalux Checkbox Multimedia anschließen. Dazu vorsichtig den am Kurzkabel des Kameramoduls befindlichen Stecker in die an der rechten Gehäuseseite der Checkbox OBEN befindliche Buchse stecken. Dabei den Stecker vor dem Einsetzen exakt ausrichten, sodass er entsprechend ohne Druck auf die in der Steckbuchse befindlichen Stifte rutscht, ohne diese zu beschädigen. Vor Inbetriebnahme die kleine Schutzkappe vom Kamera-Kopf entfernen. Schärfeneinstellung nach Wunsch am Objektiv manuell vornehmen. Bei Beamerbetrieb erst nach dessen Scharfstellung evtl. noch kleine Korrekturen vornehmen, falls erforderlich.

Anschluß der Dermalux Multimedia Cam 2008 an TV-Geräte und Video-Recorder

Cinch-Anschlußleitung (3) ebenfalls an die Dermalux Checkbox Multimedia anschließen. Die Buchse für den Cinch-Stecker befindet sich UNTEN an der rechten Gehäuseseite der Checkbox in der hinteren Ecke unterhalb der Tragebügel-Krümmung. Danach verbindet man die Cinch-Leitung mit dem TV-Gerät, Monitor oder Video-Recorder. Für Wiedergabegeräte mit Scart-Buchse zunächst den Scart-Adapterstecker (2) an die Cinch-Anschlußleitung (3) anschließen und dann über die dafür vorgesehene Scart- Buchse am Video-Recorder/TV-Gerät die Verbindung herstellen. Video/AV-Einstellung am TV-Gerät wählen.

Anschluß der Dermalux Multimedia Cam 2008 an Beamer

Cinch-Anschlußleitung (3) ebenfalls wie oben beschrieben an die Dermalux Checkbox Multimedia anschließen und über den Video-Eingang mit dem Beamer verbinden. Für Beamer mit Scart-Buchse zunächst den Scart-Adapterstecker (2) an die Cinch-Anschlußleitung (3) anschließen und dann über die dafür vorgesehene Scart-Buchse am Beamer die Verbindung herstellen.

Reparaturservice

Unseren Reparaturservice im Hause der Firma Ott in Koblenz erreichen Sie unter Telefon 0261/982422-3 bzw. Telefax 0261/982422-5. Bitte wenden Sie sich an Herrn Ott junior.

Bezugsadresse und Informationen:

KBD GmbH
Kaiserstrasse 35
D- 69469 Weinheim
Fon: 06201/59 00 65
Fax: 06201/59 00 66
E-Mail: [info @dermalux.de](mailto:info@dermalux.de)
www.dermalux.de