

## Dermalux Übungseinheiten

Die Tabelle gibt eine Methoden-Auswahl und eine erprobte Reihenfolge in einer kombinierten Hygiene- und Hautschutzschulung wieder.

Das Auftragen der Mittel erfolgt außerhalb der Dermalux Checkbox bzw. des Derma-LiteCheck Gerätes.

Zur Ergebnisskontrolle werden die Hände oder Gegenstände anschließend in die zuvor eingeschalteten Geräte gehalten und das Ergebniss (leuchtende Stellen oder Benetzungslücken) wird vom Schulungsleiter kommentiert mit Hinweisen auf die korrekten Methoden und Anwendungsmöglichkeiten.

Thema (Testprodukt)		Durchführung / Anmerkungen
<b>Kreuzkontamination</b> (Dermalux Testlotion)		
1	Händedruck	Trainer-Hände unauffällig vor der Schulung einreiben (Daumen- und Fingerkuppen) und 1-2 Teilnehmern vor Schulungsbeginn die Hand geben; nach den einleitenden Worten oder den ersten Schulungsfolien/-charts werden diese Teilnehmer nach vorne zur Händekontrolle im Gerät gebeten.
2	Türklinke	Vor der Schulung präparieren: „Der Letzte schließt die Tür“
3	Kugelschreiber, (Checklisten, Werkzeuge)	Kugelschreiber präparieren und Namen schreiben lassen
4	Handy, Schlüsselbund	„altes“ Handy präparieren (Gefahren auch für Familien zu Hause)
<b>Händewaschen</b> (Dermalux Testlotion)		<b>Hygieneplan vorhanden?</b>
5	Waschtest	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hände gründlich eincremen</li> <li>- Testlotion = unsichtbare Verschmutzung</li> <li>- Person geht Hände waschen, danach Kontrolle</li> <li>- Rechtshänder-/Linkshänderproblematik</li> </ul>
<b>Händedesinfektion</b> (Dermalux Alcohol Tester)		
6	Applikation hygienische Händedesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alcohol Tester in die Handfläche geben</li> <li>- Einreiben: 30 Sek. oder bis zur Trocknung</li> <li>- Rechtshänder-/Linkshänderproblem</li> </ul>
<b>Schutzkleidung</b> (Dermalux Testlotion)		
7	Schutzhandschuhe (Latex) ohne Kontamination der Hände ausziehen	Schutzhandschuhe anziehen lassen; danach Testlotion als Schmutz großzügig auftragen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Handschuhe ausziehen lassen</li> <li>- Hände im Gerät auf Spuren kontrollieren</li> </ul>
<b>Hautschutz / Hautpflege</b> (Dermalux Testlotion)		Hautschutzplan vorhanden?
8	Applikationskontrolle von Hautschutzmitteln: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teil der Persönlichen Schutzausstattung (PSA)</li> <li>- Schutz vor der Arbeit</li> <li>- Pflege nach der Arbeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hände eincremen lassen und korrekte Applikation im Gerät überprüfen</li> </ul> <u>Beispiele:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auftragen Handfläche innen, wenig Creme</li> <li>- Auftragen Handfläche innen, zu viel Creme</li> <li>- korrekte Methode: Auftragen Hände außen, ausreichende Menge für Schutz-/Pflegecreme ermitteln</li> </ul>
<b>Kreuzkontamination</b> (Dermalux Testlotion)		
9	Zubereitung: Brotscheibe mit Salami (und Salatblatt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daumen mit Testlotion einreiben,</li> <li>- Brotscheibe mit Salami und Salatblatt belegen,</li> <li>- Dabei Daumenabdruck hinterlassen</li> </ul>

Mit der Dermalux-Methode wird in einer Schulungsumgebung „Unsichtbares“ (Dermalux Testlotion/Alcohol Tester) sichtbar gemacht (unter UV-Licht).  
Testprodukte und Schulungs-Geräte sowie Zubehör finden Sie unter: